



PRESUROMETRO

1- Primero colgamos la bolsa intravenosa en el gancho que posee el presurómetro en la parte trasera, luego se ajusta con las tiras alrededor de la misma asegurando la sujeción.

Secuencia de armado - vista anterior

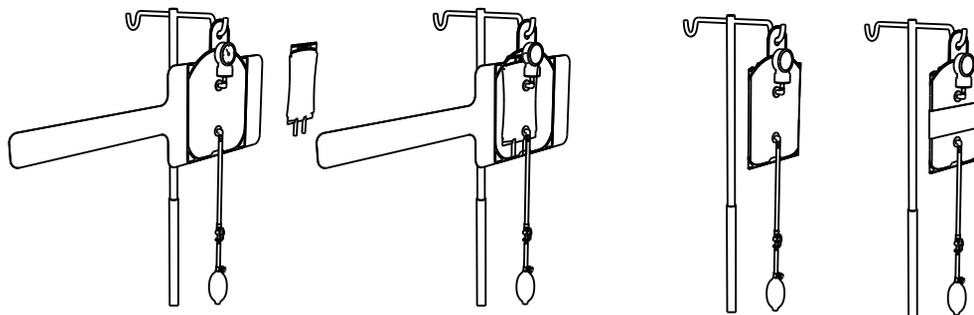

Secuencia de armado - vista posterior

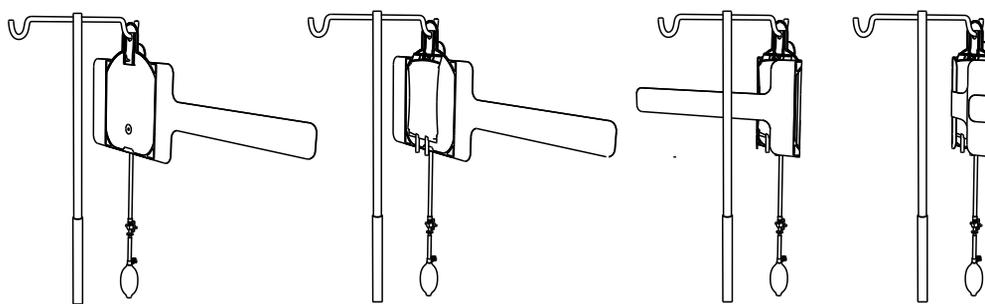

2- Rotamos la válvula a la posición de Inflado, comenzamos a inflar la misma hasta llegar a la presión deseada en el manómetro.

3- Una vez llegamos a la presión deseada rotamos la válvula para mantener la presión

4- Para desinflar, rotamos la válvula o desajustamos la tapa lateral

Para más información visite



Jc Muller Sa
www.jcmuller.com.ar

